

1.1 Formas de Apresentação do Produto

As Uclas são produtos de uso único, não esterilizados, embalados e comercializados em caixas com 1, 2, 5 ou 10 unidades.

UCLAS	
Código	Descrição
UCPL 3600	Ucla Plástica rotacional para implante Ø3,6
UCPL 3606	Ucla Plástica antirrotacional para implante Ø3,6
UCPL 4100	Ucla Plástica rotacional para implante Ø4,1
UCPL 4106	Ucla Plástica antirrotacional para implante Ø4,1
UCPL 5000	Ucla Plástica rotacional para implante Ø5,0
UCPL 5006	Ucla Plástica antirrotacional para implante Ø5,0
UPHI 4100	Ucla Plástica Rotacional p/ Hexágono Interno Ø4.1
UPHI 5000	Ucla Plástica Rotacional p/ Hexágono Interno Ø5.0
UPPC 4800	Ucla Plástica do Pilar Cônico rotacional
UPPC 4806	Ucla Plástica do Pilar Cônico Antirrotacional
UPMP 4800	Ucla Plástica do Mini Pilar
UPMP 4806	Ucla Plástica do Mini Pilar Antirrotacional

1.2 Descrição do produto

Utilizadas na reabilitação protética sobre implantes dentários osseointegráveis.

São parte intermediária da conexão protética entre a plataforma do implante e o elemento dental.

Uclas plásticas são fabricadas em Poliacetal.

No processo de fundição do Poliacetal, a Ucla deixa seu formato original, desaparece, sendo substituída por uma liga metálica de escolha do profissional, na maioria das vezes em cromo cobalto, no entanto, outras ligas como ouro, zircônia, titânio entre outras podem ser utilizadas.

1.3. Indicação de uso

As Uclas Plásticas em Poliacetal são indicadas para confecção de pilares protéticos em laboratórios pelo processo de fundição.

1.4 Advertências e Precauções

As Uclas devem sofrer processo de fundição em laboratórios protéticos especializados e com todos os princípios e materiais adequados e de boa qualidade. Isso leva a uma manutenção da interface de encaixe e adaptação destes componentes, aumentando a sobrevida do tratamento protético sobre implantes osseointegrados.

Os processos de fundição devem seguir os princípios mínimos para garantir menor deformação nesses componentes. Seu manuseio deve ser com cuidado, evitando quedas e manipulação nas áreas de assentamento destes.

As Uclas são enviadas para os profissionais devidamente embaladas, lacradas e não esterilizadas.

Para a manipulação da UCLA plástica é recomendado que o profissional tenha formação necessária e apropriada na área odontológica.

ATENÇÃO:

Não reutilizar o produto;

Não utilizar o produto que tenha sua embalagem danificada;

As Uclas devem ser armazenadas em local seco e temperatura ambiente.

Importante: Os materiais médicos-hospitalares utilizados devem ser manipulados com cuidado e descartados de acordo com as normas vigentes da instituição de saúde local.

Simbologia adotada:



Não reutilizar




Mantenha seco



Não utilizar se a
embalagem estiver
violada



Validade

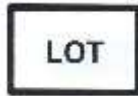

Lote



Mantenha ao abrigo do sol



Fabricante

Antes do procedimento, deve-se examinar o produto cuidadosamente para verificar sua funcionalidade e assegurar que seu tamanho e forma são os adequados para o procedimento específico no qual será utilizado.

Apenas os profissionais habilitados e especializados na área odontológica, devem usar esse produto.

O produto foi projetado para ser de uso único.

Uso individual.

1.5 Contra-indicações

A utilização das Uclas plásticas está contra-indicada nos seguintes casos:

- Plataformas protéticas não compatíveis com o sistema Implalife;
- Intra-bucal sem sofrer o processo de fundição.

1.6 Efeitos Adversos

O não respeito aos princípios de utilização desses componentes pode resultar em perda da reabilitação dentária sobre implantes e danos ao tecido gengival e ósseo peri-implantar.



INSTRUÇÃO DE USO
UCLA PLÁSTICA

IUSO-005
REV 04

PRODUTO ODONTOLÓGICO DE USO EXCLUSIVO EM LABORATÓRIO PROTÉTICO

USO INDIVIDUAL

NÃO ESTERILIZADO

Responsável Técnico: Idelmo Rangel Garcia Junior - CRO/SP 43.696

Para maiores informações sobre a ***POLÍTICA DE RECLAMAÇÕES E TROCA DE PRODUTOS IMPLALIFE***, entre no site: www.implalife.com.br.



Fabricado e Distribuído por: IMPLALIFE – Indústria de Produtos Médico-Odontológicos Ltda EPP.

Av. João Amadeu, 310 – Distrito Industrial II CEP: 15708-028 - Jales – SP

CNPJ: 09.566.849/0001-00 - Indústria Brasileira

TEL: 0800 774 3130

informações@implalife.com.br