

1- Indicações

Indicado para inserção e aperto com controle de torque dos parafusos implantáveis e dos parafusos para componentes protéticos.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO, PELO MÉTODO EM AUTOCLAVE.

2- Advertências e Precauções

O Torquímetro Mecânico não deve sofrer quedas de qualquer altura. O manuseio deve ser cuidadoso. Armazenar o Torquímetro Mecânico em ambiente seco e temperatura ambiente.

Observação: O Torquímetro Mecânico é enviado não Estéril.

O uso deste item é recomendado para profissionais da área odontológica ou médica que tenham formação adequada.

ATENCAO: Após ter sido utilizado em procedimentos cirúrgicos contaminados, o torquímetro deve ser lavado e esterilizado. Para isso, desmontar conforme abaixo:



PARA LIMPEZA INTERNA DO INSTRUMENTO:


Lavar com detergente neutro ou enzimático; Secar; Após seco, passar levemente óleo lubrificante para instrumentos rotatórios ou óleo mineral; Secar novamente em papel toalha e acondicionar para esterilização.

IMPORTANTE: Aproximadamente a cada 10 utilizações desmonte o Torquímetro Mecânico conforme esquema abaixo:

Montar conforme sequência abaixo:



**Torquímetro Mecânico
desmontado**

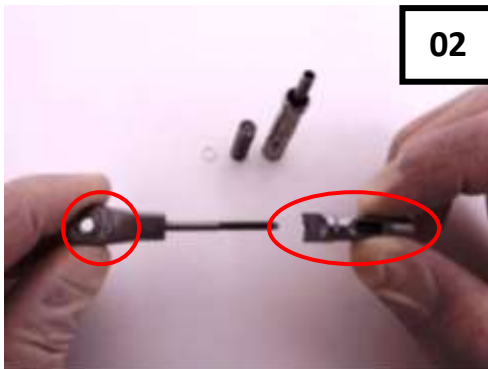


Encaixar o Porta catraca no Corpo do Torquímetro Mecânico (*Posicionar as duas peças com as gravações para cima*)



Coloque a Mola e a Arruela de plástico dentro do Cabo do Torquímetro Mecânico



Leve as duas partes montadas anteriormente, uma a outra.

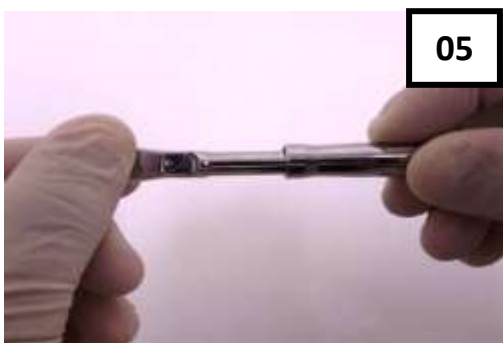

Gire no sentido horário rosqueando as duas partes

TORQ 001 - TORQUÍMETRO MECÂNICO**TORQ 002 - TORQUÍMETRO MECÂNICO**

Montado, efetue a esterilização em autoclave, conforme a tabela abaixo. Utilize um indicador químico ou biológico para validar o processo de esterilização.

Tabela de Tempos e Temperaturas de Esterilização

Processo	Temperatura	Tempo de Exposição	Tempo de Secagem
Vapor com Vácuo Prévio	132° C	4 min.	20-60 min.
Vapor c/ Força da Gravidade	132° C	40 min.	20 – 60 min.

ATENÇÃO:

Após a perda de função, danos que prejudiquem o desempenho do instrumento torquímetro e ineficácia do produto, como material médico-hospitalar, este instrumento deverá ser descartado de acordo com as normas vigentes da instituição de saúde ou de acordo com a legislação sanitária específica adotada pela área de saúde.

PRODUTO ODONTOLÓGICO REUTILIZÁVEL APÓS PROCESSO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

Resp. Téc.: Prof.º Dr. Idelmo Rangel Garcia Jr. CRO-SP: 43.696

Instrumentais Cirúrgicos Torquímetro Mecânico
Reg. ANVISA: 80516010008

Para maiores informações sobre a **POLÍTICA DE RECLAMAÇÕES E TROCA DE PRODUTOS IMPLALIFE**, entre no site: www.implalife.com.br.



INSTRUÇÃO DE USO
TORQUÍMETRO MECÂNICO

IUSO-010
REV 02



Fabricado e Distribuído por:
IMPLALIFE – Indústria de Produtos Médico-Odontológicos Ltda.
Av. João Amadeu, 310 – Distrito Industrial II CEP: 15708-028 - Jales – SP
CNPJ: 09.566.849/0001-00 - Indústria Brasileira
TEL: 0800 774 3130
informacoes@implalife.com.br